



ADJUSTMENT

ANPASSEN

AJUSTEMENT

ADATTARE

AJUSTE

A AFINAÇÃO

AANPASSING

JUSTERING

調整

GB - 10 **D** - 14 **IT** - 18 **FR** - 22

ES - 26 **BP** - 30 **NL** - 34 **SV** - 38 **JP** - 42

READ BEFORE USE






www.leatt.com





Fig.1

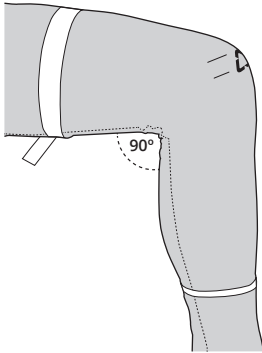1.1



1.2


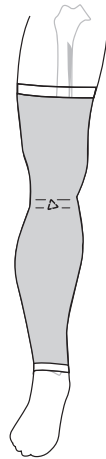


Fig.2

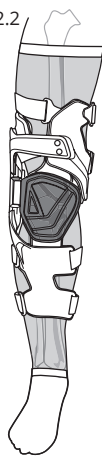
2.1



2.2



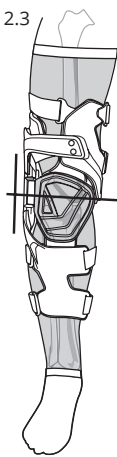2.3



2.4

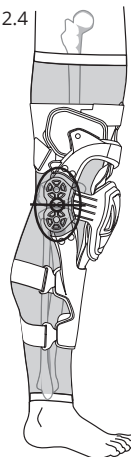


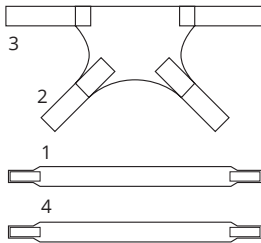


Fig.3

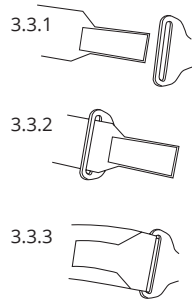
3.1




3.2




3.3



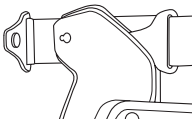
3.4.1



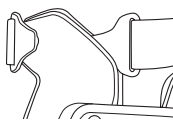
3.4.2




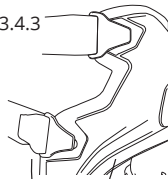
3.4.3



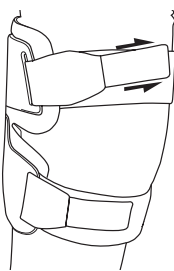3.5.1



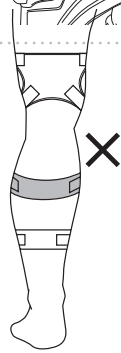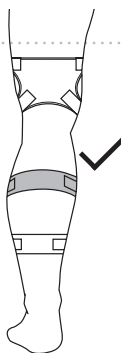3.5.2



4


Copyright © 2016, Leatt® Corporation

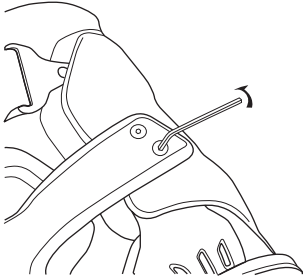

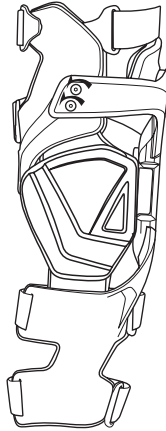


Fig.4

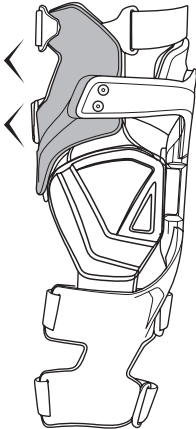
4.1



4.2



4.3



4.4


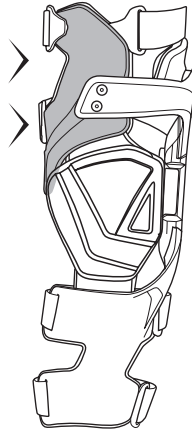
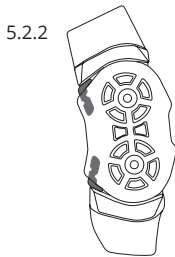
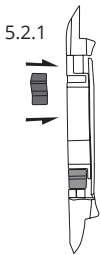
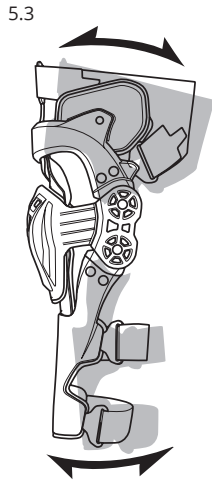
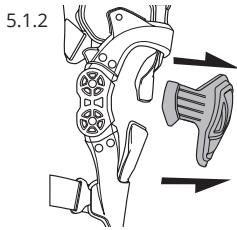




Fig.5

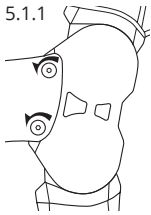

5.4

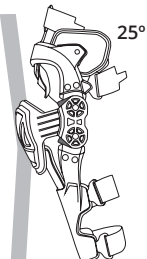
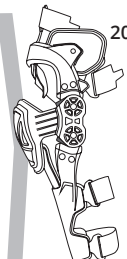
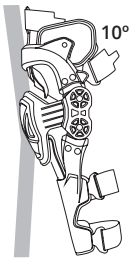
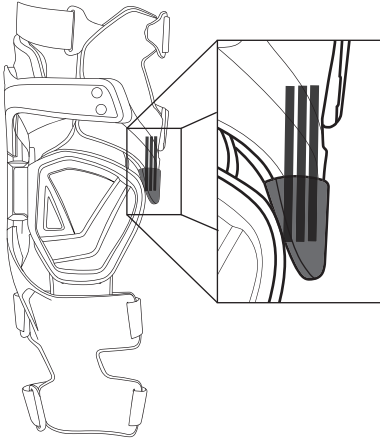


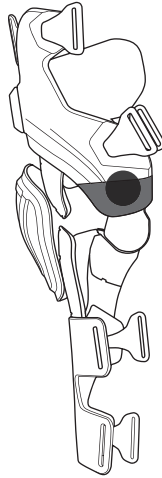


Fig.6

6.1



6.2



6.3

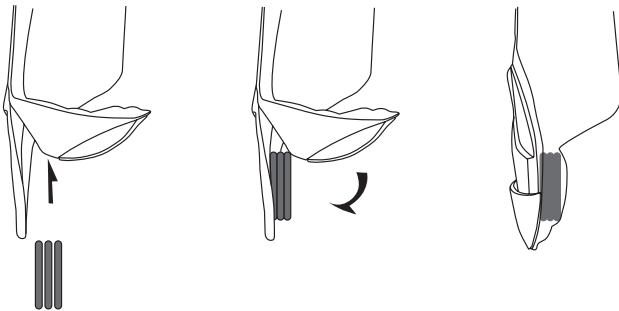
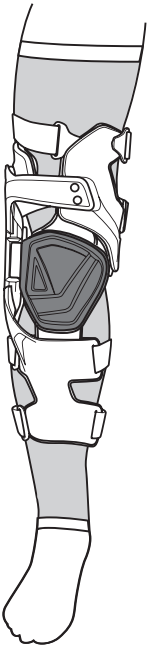


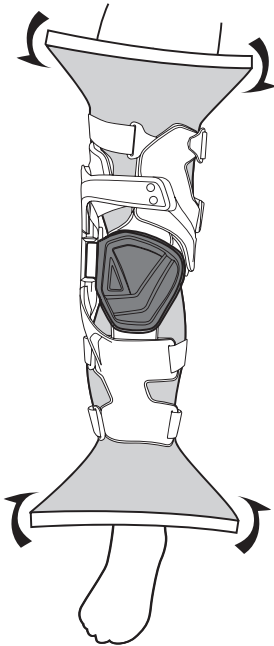


Fig.7

7.1



7.2



7.3

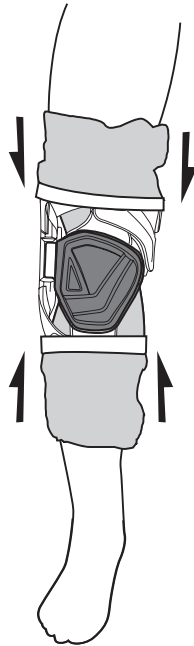
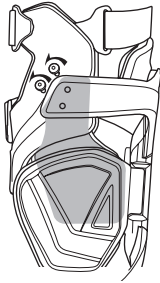


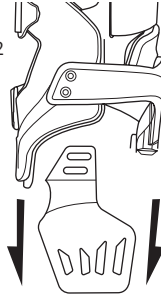


Fig.8

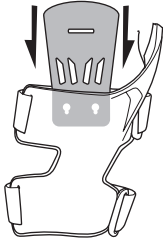
8.1




8.2




8.3



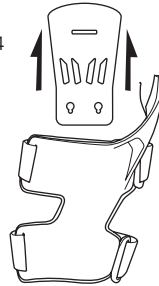
8.4



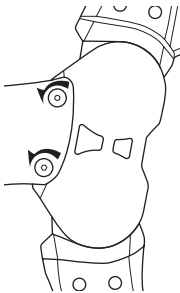8.5



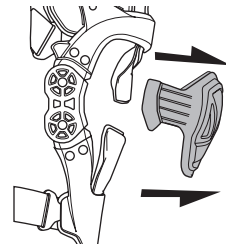8.6





! WAARSCHUWING

Persoonlijke beschermingsmiddelen Leatt® Corporation is niet ontworpen of bedoeld een drager tegen ernstig lichamelijk letsel veroorzaakt door harde botsingen of neerstorten te beschermen. Beschermingsmiddelen zoals rug of lumbale bieden geen bescherming tegen ruggengraatletsel. Geen beschermende uitrusting kan de drager te beschermen tegen alle voorzienbare gevolgen.





Fig.1 (p.3) - Knie Huls Aanpassen:

Monteer de binnenste knie huls voorzien van uw brace, let op de rechts / links -indicator op de mouw voor de juiste montage, met de Leatt -logo gecentreerd over uw knieschijf.

Fig.2 (p.3) – Knie Brace Positionering

Fig.3 (p.4) – Band Aanpassen:

Begin met riem 1 en werk je weg door om riem 4, aan te passen en passen bij een comfortabele tolerantie, zorg ervoor dat de armaturen correct geknipt in de body van de C Frame Brace.

Bij het monteren van het kalf riemen, zorgen er altijd voor dat de bovenste band boven de kuit om te voorkomen dat de C Frame Brace naar beneden glijdt je been.

Fig.4 (p.5) - Knie Brace Aanpassen:

Gebruik de meegeleverde inbussleutel , past u de bovenkant van de C Frame Brace strut naar de gewenste positie waarbij montage is comfortabel.

Fig.5 (p.6) – Hoekaanpassing:

De mate afstandhouders verstrekt kunt u de hoek van het scharnier veranderen lock-out te voorkomen en handhaven van een comfortabele zitpositie .

Fig.6 (p.7) - Knie Aanpassing

Extra afstandhouders geleverd (gebruik 0-3 stuk per innerlijke knie laden pad) naar bandenspanning punt binnen knie.

Fig.6 (p.8) – Huls Vouw Over

Zodra de C Frame Brace is op zijn plaats en de montage voelt comfortabel , vouw de top en onderkant van de huls over de beugel die een goede pasvorm . Dit vermindert ook de kans van de broek vangen op de C Frame Brace tijdens het rijden. Sta op en zorg ervoor dat je knie kan niet lock-out en montage is comfortabel.

Fig.8 (p.9) - Knie Verwijdering Cup

Reinigen



Alleen schoonvegen



In de schaduw hangend laten drogen



Niet strijken



Niet geschikt voor de wasmachine



Geen bleekmiddel gebruiken



Niet in de droogtrommel

Alleen afnemen met een zachte doek gedrenkt in milde zeep of mild reinigingsmiddel opgelost in koud water, afspoelen door afnemen met een zachte doek gedrenkt in koud water en afdrogen met een zachte doek. Comfortvulling kan met de hand worden gewassen en aan de lucht gedroogd.

Gewone substanties die met dit product in aanraking komen (oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, haarproducten, enz.) kunnen schade veroorzaken die onzichtbaar kan zijn voor de gebruiker, maar de doelmatigheid/veiligheid van uw Leatt®-helm in gevaar brengt. Raadpleeg altijd het etiket met de gebruikte materialen in de helm. Van geen van de in het product gebruikte materialen is bekend dat ze stoffen bevatten die een allergische reactie zouden kunnen veroorzaken of die een gevaar voor de gezondheid zouden kunnen vormen.

GARANTIE

Uw Leatt®-product is gewaarborgd vrij te zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum. Uw Leatt®-product kan onder bepaalde gebruiksomstandigheden meegeven of breken. Vandaar dat schade veroorzaakt door ongevallen, vallen, misbruik of verkeerd gebruik niet wordt gedekt door deze beperkte garantie.

Als u een garantieclaim wilt indienen, gaat u naar www.leatt.com of stuurt u een e-mail naar warranty@leatt.com.

LEATT® CORPORATION WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, DIRECT DAN WEL INDIRECT, AF, WAARONDER DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.



NL

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

No. 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, Zuid-Afrika
Tel.: +27 21 557 7257
Fax: +27 21 557 7381
E-mail: info@leatt.com
Website: www.leatt.com

Postadres:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, Zuid-Afrika

Verenigde Staten:

Tel.: 661 287 9258
Gratis: 1.800.691.3314
Fax: 661 287 9688

Europa:

E-mail: Leatt-EU-contact@leatt.com





! VARNING

Leatt® företags personalskyddsutrustning är inte utformad eller avsedd att skydda en bärare mot allvarliga kroppsskador orsakade av våldsamma kollisioner eller stötar. Skyddsutrustning såsom rygg- eller ländskydd skyddar inte mot ryggmargsskada. Ingen skyddsutrustning kan skydda bäraren från förutsebar påverkan.

**SV**

Fig.1 (p.3) - Manschettpassning:

Passa insidans knämanschett som kommer med ditt stöd, notera att den högra/vänstra indikatorn på manschetten har korrekt passning, med Leatt-logotypen centrerad över din knäskål.

Fig.2 (p.3) - Placering av knästöd

Fig.3 (p.4) - Remjustering:

Börja med rem 1 och gå vidare till rem 4, justera och anpassa till en bekväm tolerans genom att se till att passningarna är korrekt klippta i C-ramstödet.

När du passar in kalvremmarna se alltid till att den översta remmen är placerad ovanför kalvremmen för att förhindra att C-ramstödet glider utmed ditt ben.

Fig.4 (p.5) - Passning av knästöd:

Använd medföljande insexnyckel till att justera den övre delen av C-ramstödet tvärså till önskad position för bekväm passning.

Fig.5 (p.6) - Vinkelpassning:

De medföljande gradbrickorna gör att du kan ändra vinkeln på gångjärnet och hindra låsning och upprätthålla ett bekvämt körläge. Se till att du använder samma brickgrad på både övre och nedre delen.

Fig.6 (p.7) - Knäjustering:

Ytterligare brickor medföljer (använd från 0 till 3 delar per innerknäets vadderade skydd) för att justera tryckpunkten på insidan av knäet.

Fig.7 (p.8) - Vikning av manschett:

När C-ramstödet är på plats och passningen är bekväm, vik övre och nedre delen på manschetten över stödet till en säker passning.

Detta minskar också risken att byxorna fastnar i C-ramstödet under körningen.

Fig.8 (p.9) - Borttag av knäskål



Rengöring



Torka enbart rent



Dropptorka i skugga



Stryk inte



Maskintvätta inte



Blek inte



Torktumla inte

Rengör enbart med en mjuk trasa som fuktats med mild tvål eller mildt rengöringsmedel i kallt vatten. Skölj genom att torka av med en mjuk trasa som fuktats med kallt vatten och torka med en torr trasa. Komfortkuddar kan handtvättas och lufttorkas.

Vanliga medel som appliceras på denna produkt (lösningsmedel, rengöringsmedel, hårvatten etc.) kan orsaka skada som inte syns men som kan orsaka sämre effekt/säkerhet hos din Leatt®-hjälm. Kontrollera alltid materialinnehållet på etiketten i din hjälm. Inget av de material som använts för att tillverka denna produkt är känt för att innehålla något ämne som kan orsaka allergiska reaktioner eller vara farliga för hälsan.

GARANTI

Din Leatt®-produkt är garanterad för material- och tillverkningsfel under ett år från inköpsdatum. Din Leatt®-produkt kan gå sönder under vissa användningsförhållanden. Skador som orsakats av olyckor, fall, våld eller felaktig användning täcks därför inte av denna begränsade garanti.

Gå till www.leatt.com eller skicka e-post till warranty@leatt.com om du vill göra garantianspråk.

LEATT® CORPORATION FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE SÄLJBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.



SV

Kontaktuppgifter

Huvudkontor:

Nr 12, Kiepersol Crescent, Atlas Gardens,
Contermanskloof, Durbanville, 7550,
Cape Town, Sydafrika
Tel: +27 21 557 7257
Fax: +27 21 557 7381
E-post: info@leatt.com
Webbplats: www.leatt.com

Postadress:

Suite 109, Private Bag X3, Bloubergrant,
7443, Sydafrika

USA:

Tel: 661 287 9258
Avgiftsfritt: 1.800.691.3314
Fax: 661 287 9688

Europa:

E-post: Leatt-EU-contact@leatt.com





www.leatt.com

